

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からモータースポーツの最前線まで。

エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。

わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高機能素材 EX GEL
(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかる際、エクスジェルは身体の形に合わせ柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない（スポンジ状ではない）ため座ったときの底つき感が少なく、

優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ10倍以上の高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。

エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

身体の動きへの追随性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追随するため、低反発ウレタンフォーム等とは

異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。



■ 製造元 株式会社 加 地

本社 / 工場
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7

横浜営業所
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33サウス・コア内

■ 製造国 日 本

TEL : 0854-54-2288
FAX : 0854-54-2282

TEL : 0774-98-2633
FAX : 0774-95-3853

TEL : 045-482-3551
FAX : 045-482-3552

○エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。○モニートクッション®は株式会社加地の登録商標です。
○掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。

MOR01-INS-JP01

<http://www.exgel.jp/>

車いす用姿勢保持クッション

モニート

リハ

Moneat REHA

取扱説明書



安全に正しくお使いいただくために


この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。



クッションの特長

横浜市総合リハビリテーションセンターと共同開発した、調整の必要がなく置くだけで使用可能な車いす用姿勢保持クッションです。円背の方、股関節がやや伸展気味な方、骨盤後傾気味の方に推奨します。

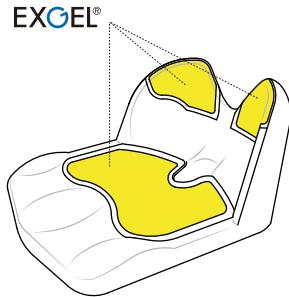

正しい使い方

■ 設置方法

車いすの上に右図のように設置してください。本クッションは前後方向があります。V字カットのある背もたれ部分が後方でVカット部分が上になるように設置してください。

専用カバーのファスナーが後方下側(車いす側)になります。

※ クッション本体を専用カバーに入れた状態でブランドタグが右図の位置になります。

⚠ リクライニング車いすでは使用できません。


■ 座り方

① 後傾した骨盤の隙間を埋めるようにしっかりと奥まで座ってください。

② 上体を起こし、脊柱を後方に逃がし圧力を緩和するために脊柱がV字カット部分の中央にくるように背もたれに上体を預けてください。


⚠ クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。

・円背の方は無理に骨盤を起こすと上体が前に倒れやすくなります。また上体を起こすと骨盤が後傾し前ずれやすくなります。本クッションは骨盤の後方の隙間を埋めて骨盤の後傾を抑制しながら、骨盤を左右から支え自然な姿勢をサポートします。

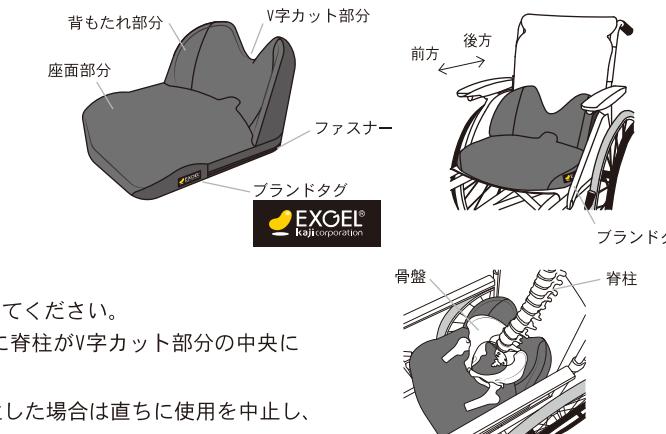


■ 専用カバーの取り外し方法


①専用カバー後側のファスナーを開きます。

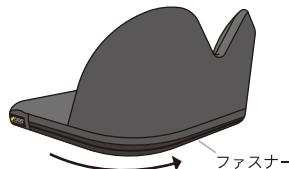

②専用カバーの背もたれ部分を取り外します。

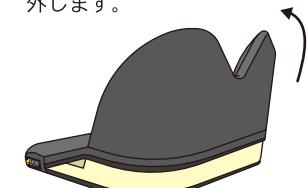

③専用カバーを取り外します。

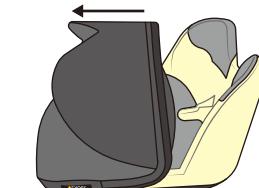


■ 専用カバーの取り付け方法


①背もたれ側にファスナーが来るよう、座面側から専用カバーを被せます。



②専用カバーを背もたれ部分に被せます。

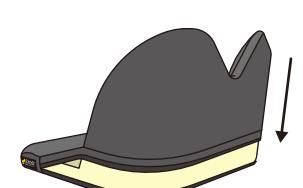

③専用カバー後側のファスナーを閉じます。

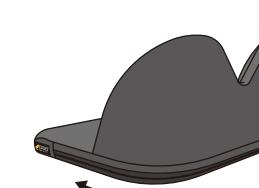

⚠ 専用カバーの取り外しや取り付けの際に無理にクッション本体を折り曲げないでください。

お手入れ方法

■ 専用カバー

- 取り外した専用カバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。（洗濯ネットの使用をお薦めします）
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- 色落ちする事がありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- 煮沸消毒、アイロンがけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。



■ クッション本体

- GELシートが汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- 水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- 洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

■ クッション本体のおことわり

- ウレタン特有のにおいがする場合があります。
- ウレタン表面に製造上小さな凹みが複数ある場合がありますが、使用上問題ありません。
- ウレタンは時間の経過とともに変色します。

■ 消毒（クッション本体）

- 消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
大量の消毒薬やアルコールを噴霧することは避け、濡れたまま長時間放置しないでください。
次亜塩素酸ナトリウムなど腐食性が強い消毒薬は使用しないでください。劣化の原因になります。
- 消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
原液のまま使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- 有機溶剤（シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。



△ 安全上の注意事項

- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保障するものではありません。
- ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 80°C以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用しているので跡が残る恐れがあります。
- 製品を傷める恐れがあるので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- 保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、カバー座裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

製品スペック

製品/付属品内容：クッション本体 1個（専用カバー付）・取扱説明書（本書類）1枚・保証書 1枚

EXGEL® モニートREHA(リハ)	品名	エクスジェル® モニートREHA(リハ)		
	カラー	カバー：ブラック		
	材質	GELシート	表材	ウレタン合成皮革
		中材	エクスジェル（合成ゴム）、ウレタンフォーム	
	本体	ウレタンフォーム		
	カバー	表材	ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム	
		背裏材	ポリエステル100%	
		座裏材	滑り止め加工付きナイロン	
	品番	MOR01-BK1	サイズ	W400×D420×H210 (mm)
			重量	約1.2kg