

品名	エクスジェル®アウルカンフィ 円座		
カラー(品番)	本体	チャコール	
	カバー	グレー(OWF50-GR)、ブラウン(OWF50-BR)	
本体	材質	表材	クロロプレンゴム・ナイロン 100%
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
カバー	材質	表材	ポリエステル 100%・ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
サイズ・重量	W400×D400×H37 (mm)・約 1.0kg ※製品サイズ、重量は個体差があります。		

#### 製品 / 付属品内容

- ・クッション本体 1 個
- ・専用カバー 1 枚
- ・取扱説明書(本書類)1 枚
- ・保証書 1 枚

※EXGEL®、エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

※アウル®は株式会社加地の登録商標です。

※本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

# EXGEL®

## 取扱説明書

### エクスジェル®アウルカンフィ 円座 OWF50



本体



カバー

**kaji** corporation

www.exgel.jp

株式会社 加地

《本社》  
〒699-1511  
島根県仁多郡奥出雲町三成  
1295-3  
TEL：0854-54-2288

《横浜営業所》  
〒224-0032  
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央  
8-33 サウス・コアビル内  
TEL：045-482-3551

《けいはんな R&D センター》  
〒619-0237  
京都府相楽郡精華町光台 3-2-7  
TEL：0774-98-2633

## 安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、  
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。


※上記画像は OWF50-GR です。  
※写真は現物とは異なる場合があります。

## 正しい使い方

### ■ 設置方法


① クッション本体に専用カバーを装着します。

その際本体は凹凸面が上側に、カバーは滑り止めが下側になるように装着してください。

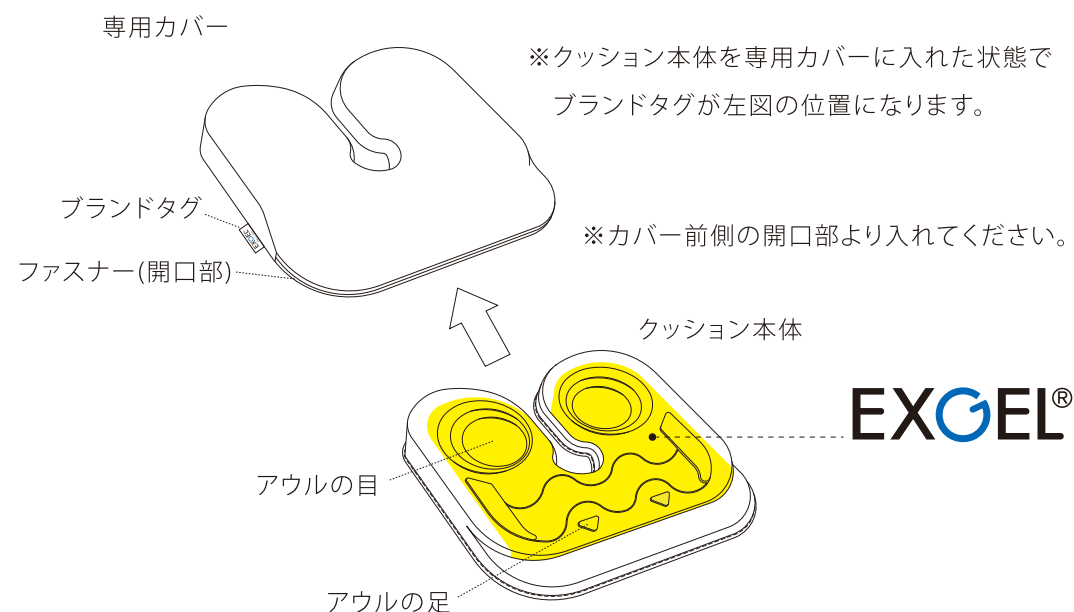


② 椅子などの上に右図のようにクッションを置いてください。

※カバーのファスナーが前側になります。

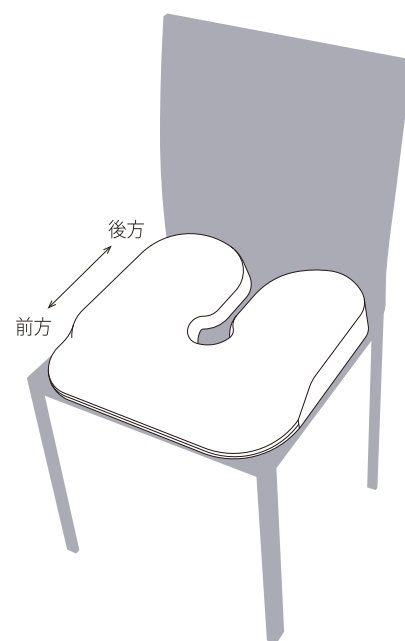

③ 下図のように座ると最も圧力のかかる坐骨部がアウルの目の位置になり、圧力の集中を緩和します。

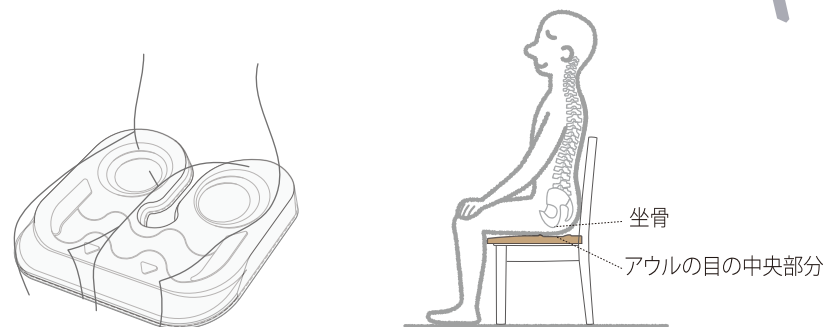

## 使用上の注意事項(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### ⚠ 警告

- ・クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

### ⚠ 注意

- ・クッション本体は、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。汚れた場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませ拭き取ってください。
- ・取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。洗濯ネットのご使用をお勧めします。色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。アイロンや乾燥機等は使用できません。乾燥する際は日陰で平干ししてください。商業クリーニングはできません。
- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・本製品を設置する椅子やシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際にはご注意ください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯方法等により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

### 保管方法

- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。

品名	エクスジェル®アウル カンフィ 円座 円座に見えないカバー付き		
カラー(品番)	本体	チャコール	
	カバー	グレー(OWF50-GR5)、ブラウン(OWF50-BR5)	
本体	材質	表材	クロロプレンゴム・ナイロン 100%
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
カバー	材質	表材	ポリエステル 100%・ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
サイズ・重量	W400×D400×H37 (mm)・約 1.0kg ※製品サイズ、重量は個体差があります。		

#### 製品 / 付属品内容

- ・クッション本体 1 個
- ・専用カバー 1 枚
- ・取扱説明書(本書類)1 枚
- ・保証書 1 枚

※EXGEL®、エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

※アウル®は株式会社加地の登録商標です。

※本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

**kaji** corporation

www.exgel.jp

株式会社 加地

《本社》  
〒699-1511  
島根県仁多郡奥出雲町三成  
1295-3  
TEL：0854-54-2288

《横浜営業所》  
〒224-0032  
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央  
8-33 サウス・コアビル内  
TEL：045-482-3551

《けいはんな R&D センター》  
〒619-0237  
京都府相楽郡精華町光台 3-2-7  
TEL：0774-98-2633

OWF50-5-INS-JP03

# EXGEL®

## 取扱説明書

### エクスジェル®アウル カンフィ 円座 円座に見えないカバー付き OWF50



本体



カバー

## 安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、  
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

※上記画像は OWF50-BR5 です。  
※写真は現物とは異なる場合があります。


Made in Japan

## 正しい使い方

### ■ 設置方法

① クッション本体に専用カバーを装着します。


その際本体は凹凸面が上側に、カバーは滑り止めが下側になるように装着してください。

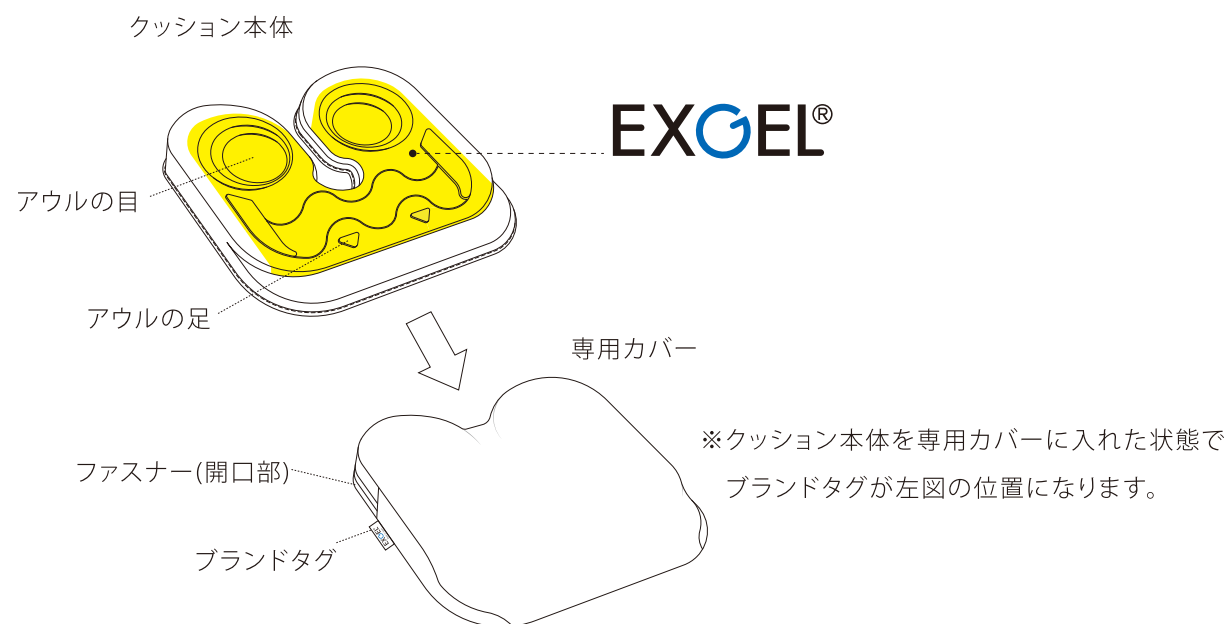


※カバー後ろ側の開口部より入れてください。

② 椅子などの上に右図のようにクッションを置いてください。

※カバーのファスナーが後側になります。

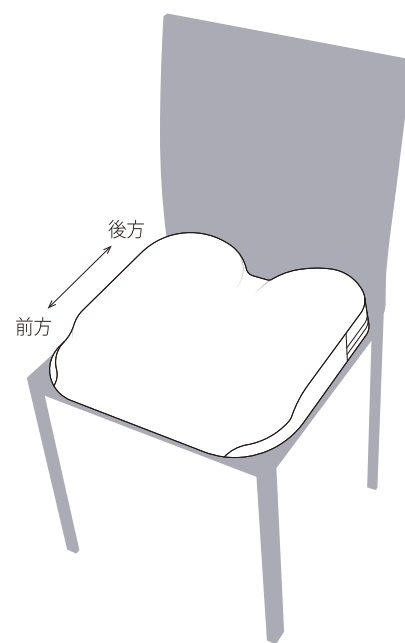

③ 下図のように座ると最も圧力のかかる坐骨部がアウルの目の位置になり、圧力の集中を緩和します。

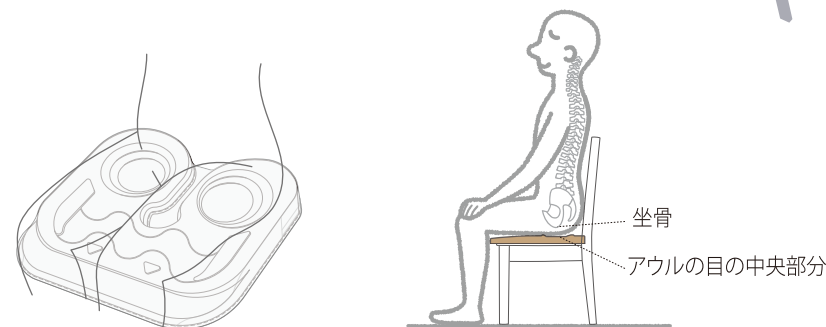

## 使用上の注意事項(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### ⚠ 警告

- ・クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

### ⚠ 注意

- ・クッション本体は、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。汚れた場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませ拭き取ってください。
- ・取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。洗濯ネットのご使用をお勧めします。色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。アイロンや乾燥機等は使用できません。乾燥する際は日陰で平干ししてください。商業クリーニングはできません。
- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・本製品を設置する椅子やシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際にはご注意ください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯方法等により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

### 保管方法

- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。