


# エクスジェル® シャワーいす用クッション取扱説明書 EXGEL®

この度はエクスジェル® シャワーいす用クッションをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、シャワーいす用クッションを正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、  
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

## 仕様

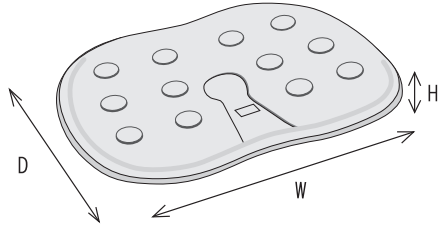

品名	エクスジェル® シャワーいす用クッション		
品番	AFK-01		
素材	表材	中材	裏材
	クロロプレンゴム・ナイロン100%	エクスジェル®(合成ゴム)・ゴムスポンジ	滑り止め加工付きナイロン
寸法	W345 × D240 × H20 mm		
重量	約0.5kg		


## 安全上の注意事項

- ・シートは座面としてのみご使用ください。背当て等の様に立てかけてご使用にならないでください。必ず平らにしてご使用ください。
- ・本体の中身をおおっている表裏面の被覆素材は一体縫製のため、分解が出来ません。
- ・表地を鋭いものでついたり、切ったりしないでください。
- ・製品を折り曲げてご使用にならないでください。
- ・本体は火気等に近付いたり、たばこの火を落としたりしない様にご注意ください。
- ・本体を洗濯したり、乾燥機にかけないでください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・保管する際は、立てかけずに平らにしてください。
- ・直射日光や高温な場所での長時間の放置は避けてください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、カバー底面の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

## お手入れ方法

- ・本体の表地が汚れた場合は、水、又は中性洗剤を含んだ布等で拭き、陰干ししてください。（漂白剤等のご使用不可）
- ・煮沸消毒をしたり、50℃以上の熱湯をかけたりしないでください。
- ・消毒する場合は、汚れをきれいに除去し、アルコールスプレー等を噴霧してください。
- ・本体は洗濯機、乾燥機のご使用はできません。

## 正しい使い方

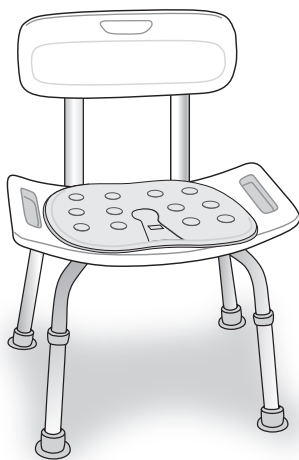

図のような使用状態を継続した場合、ジェルの移動によりクッション形状が変形してしまう恐れがありますのでご注意ください。



正しい座り方



斜め座り



縦使用



- ・ご使用後は、水洗いをし浴室外の風通しのよい場所で乾かしてください。
- ・浴室内、又は水場にそのまま放置しないでください。

**EXGEL®**  
kaji corporation  
<http://www.exgel.jp/>  
エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

■ 製造国 日本  
■ 製造元 株式会社 加地  
横浜営業所  
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33  
サウス・コア内  
TEL : 045-482-3551 FAX : 045-482-3552

本社/工場  
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3  
TEL : 0854-54-2288 FAX : 0854-54-2282  
けいはんなR&Dセンター、京都営業所  
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7  
TEL : 0774-98-2633 FAX : 0774-95-3853