

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


当製品は人間の介護用品として開発された褥瘡^{しよくそう}予防ジェルを採用した愛犬・愛猫用介護用品です。

この取扱説明書には、当製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

仕様

| | | | |
|-----|--------------------|-------------|----------------------|
| 品名 | エクスジェルマット | | |
| カラー | 本体：ベージュ / カバー：ベージュ | | |
| サイズ | Lサイズ | 約60×100×1cm | |
| | Mサイズ | 約60×50×1cm | |
| 材質 | 本体 | 表材 | ウレタン合成皮革 |
| | | 中材 | 合成ゴム(エクスジェル®)、ポリウレタン |
| | | 裏材 | ナイロン100% |
| | カバー | 表材 | 綿100% |
| | | 裏材 | ポリエステル100% |

製品

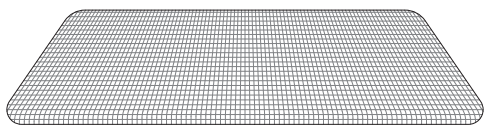

・当製品をより長持ちさせるよう、適宜使用位置を替えてご使用ください。

△安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個体差があり、本製品はその軽減や緩和を保證するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・カバー裏材の滑り止め樹脂は、塩化ビニル製品やソファや床等に使用されている一部ワックス剤等、可塑剤を含有する製品と長時間密着させないでください。滑り止め樹脂が変質する恐れがあります。
- ・ペットが万が一、本製品を飲み込んだ場合は、専門医にご相談ください。
- ・ペットがカバーの繊維を引っ張ったりしないようご注意ください。
- ・ホットカーペットや床暖房の上では使用できません。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。

お手入れ方法

■ カバー

- ・洗濯表示を必ずお守りください。



- ・取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。

(洗濯ネットの使用をお勧めします)

※洗濯の際はファスナーを閉めてください。他の洗濯ものを傷めるおそれがあります。

- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。

- ・アイロンかけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。

※クッション本体にカバーを装着する際、本体は凹凸面が上側に、カバーは裏材(滑り止めドット加工面)が下側になるようにしてください。

■ クッション本体

- ・汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・折り曲げたり、丸めた状態で長期間保管しないでください。
- ・長期間収納する際、マットの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自自治体のルールに従い処理してください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、カバー裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

エクスジェルの特徴

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からベビー用品、モータースポーツの最前線まで。

エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。

わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高機能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。

人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせ柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底つき感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ10倍以上の高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。

エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

身体の動きへの追従性

柔軟な素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。

EXGEL®
kaji corporation
<http://www.exgel.jp/>
エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

■ 製造国 日本
■ 製造元 株式会社 加地
横浜営業所
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33
サウス・コア内
TEL : 045-482-3551 FAX : 045-482-3552

本社/工場
〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3
TEL : 0854-54-2288 FAX : 0854-54-2282
けいはんなR&Dセンター、京都営業所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7
TEL : 0774-98-2633 FAX : 0774-95-3853