

製品スペック

製品/付属品内容：アウルREHA本体 1枚・専用カバー 1枚・取扱説明書(本書類) 1枚・保証書 1枚

品 名		エクスジェル® アウル REHA								
		レギュラー			ミドル			ハイ		
		400幅	380幅	360幅	400幅	380幅	360幅	400幅	380幅	360幅
品 番		OWL21-BK1-4040	OWL21-BK1-3840	OWL21-BK1-3640	OWL26-BK1-4040	OWL26-BK1-3840	OWL26-BK1-3640	OWL22-BK1-4040	OWL22-BK1-3840	OWL22-BK1-3640
サイズ (mm)	W	400	380	360	400	380	360	400	380	360
	D	400			400			400		
	H	40			60			80		
重 量(Kg)		約1.2	約1.1	約1.0	約1.3	約1.3	約1.2	約1.4	約1.4	約1.3

品 名		エクスジェル® アウル REHA								
		3Dレギュラー			3Dジャスト			3Dハイ		
		400幅	380幅	360幅	400幅	380幅	360幅	400幅	380幅	360幅
品 番		OWL23-BK1-4040	OWL23-BK1-3840	OWL23-BK1-3640	OWL25-BK1-4040	OWL25-BK1-3840	OWL25-BK1-3640	OWL24-BK1-4040	OWL24-BK1-3840	OWL24-BK1-3640
サイズ (mm)	W	400	380	360	400	380	360	400	380	360
	D	400			400			400		
	H	(A)75(B)72(C)53(D)68			(A)80(B)50(C)35(D)68			(A)110(B)80(C)65(D)88		
重 量(Kg)		約1.7	約1.6	約1.5	約1.5	約1.5	約1.4	約1.9	約1.9	約1.8

カラー			本体：グレー / カバー：ブラック		
材 質	本 体	表材	ウレタン合成皮革		
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム		
		裏材	滑り止め加工付きナイロン		
	カバー	表材	ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム		
			滑り止め加工付きナイロン		

kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3
TEL:0854-54-2288
FAX:0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7
TEL:0774-98-2633
FAX:0774-95-3853

横浜営業所
〒224-0032 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19-11 加瀬ビル88 8F
TEL:045-482-3551
FAX:045-482-3552

メールでの
お問い合わせ



○エクスジェル® / EXGEL® は株式会社加地の登録商標です。○アウル® / OWL® は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

OWL21/22/23/24/25/26-INS-JP11

<https://exgel.jp/jpn/>

ア ウ ル リ ハ
Owl REHA

取扱説明書



レギュラー



3 Dレギュラー



ミドル



3 Dジャスト



ハイ



3 Dハイ

安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

 **EXGEL®**
kaji corporation

EXGEL®



- ・アウルREHAは利用者の体格や症状に合わせて6種類の形状から選んでご利用いただけます。
- ・ふくろうのデザインは臀部を効果的に減圧する機能性から導かれたデザインです。
- ・アウルアイが最も圧力のかかる坐骨部を包みこむようにサポートして効果的に減圧します。
- ・本体表面はしなやかでストレッチ性に優れた合成皮革を使用しており、表面が汚れてもメンテナンスが簡単です。


■ 専用カバー

- ・表面がさらっとした風合いのストレッチ性カバーでムレを防ぎます。
- ・防水機能のあるフィルムをラミネートしています。
- ・専用カバーは着脱可能でお洗濯いただけます。
- ・底面は滑り止め加工されており、使用中の不快なずれを防止します。

正しい使い方

■ 設置方法

- ① クッション本体に専用カバーを装着します。その際クッション本体は凹凸面が上側に、専用カバーは滑り止めが下側になるようイラストのように装着してください。

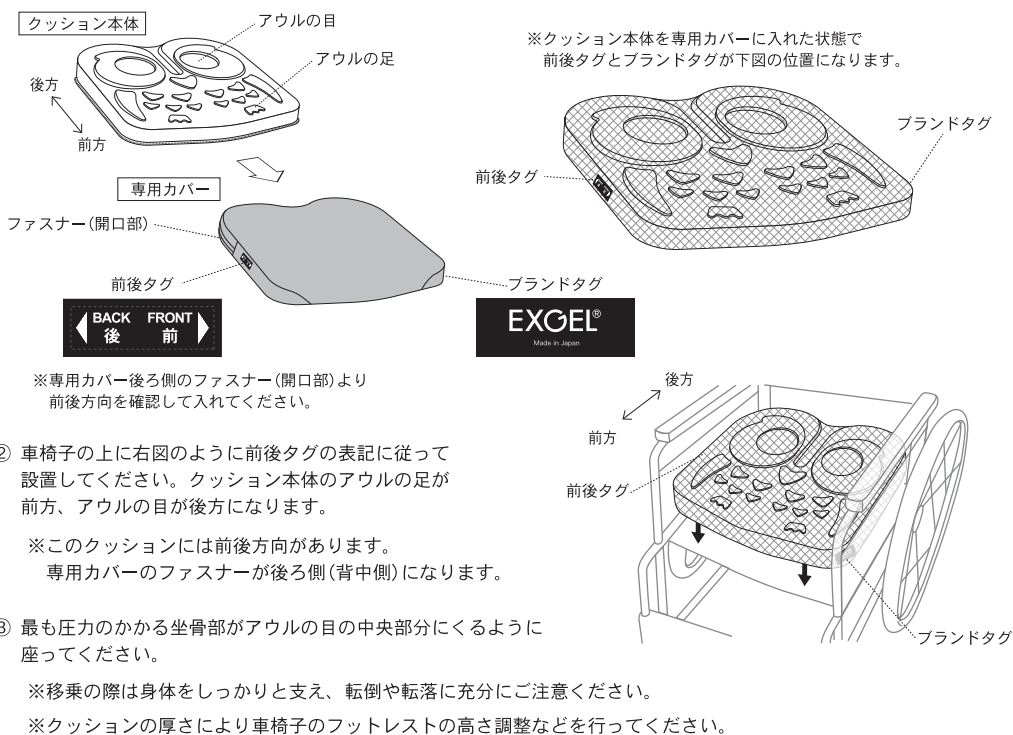

- ② 車椅子の上に右図のように前後タグの表記に従って設置してください。クッション本体のアウルの足が前方、アウルの目が後方になります。
 - ③ 最も圧力のかかる坐骨部がアウルの目の中央部分にくるように座ってください。
- △ クッションのご使用は医師や専門家にご相談のうえご使用ください。
- △ クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- △ ご自身で身体を支えられない方は、必ずどなたか立ち会いのもとご使用ください。

■ 専用カバー

- ・取り外した専用カバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお薦めします。)
- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンがけ、商業クリーニング、乾燥機の使用はできません。
- ・乾燥する際は日陰で平干ししてください。



■ クッション本体

- ・汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

■ 消毒

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
- ・次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
- ・但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1%に希釈して使用してください。
- ・原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。




△ 安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェル特性上、高温時の蒸れや低温時の冷さを感じる場合があります。
- ・その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
- ・クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・本製品を設置する椅子やシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際はご注意ください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、専用カバー裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
- ・クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。

製品スペック

製品/付属品内容: アウルREHA本体 1枚・専用カバー 1枚・取扱説明書(本書類) 1枚・保証書 1枚

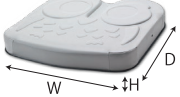品 名		エクスジェル® アウル REHA					
		レギュラー		ミドル		ハイ	
		430幅	460幅	430幅	460幅	430幅	460幅
							
品 番		OWL21W-BK1-4340	OWL21W-BK1-4640	OWL26W-BK1-4340	OWL26W-BK1-4640	OWL22W-BK1-4340	OWL22W-BK1-4640
サイズ (mm)	W	430	460	430	460	430	460
	D	400		400		400	
	H	40		60		80	
重 量(Kg)		約1.3	約1.4	約1.4	約1.6	約1.6	約1.7

カラー			本体:グレー / カバー:ブラック
材 質	本 体	表材	ウレタン合成皮革
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
	カバー	表材	ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン

kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加 地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3
TEL:0854-54-2288
FAX:0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7
TEL:0774-98-2633
FAX:0774-95-3853

横浜営業所
〒224-0032 神奈川県横浜市港北区新横浜 3 丁目19-11 加瀬ビル88 8F
TEL:045-482-3551
FAX:045-482-3552

○エクスジェル® / EXGEL® は株式会社加地の登録商標です。○アウル® / OWL® は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

OWL21W/22W/26W-INS-JP03

<https://exgel.jp/jpn/>

ア ウ ル リ ハ
Owl REHA

取扱説明書



レギュラー 430幅/460幅



ミドル 430幅/460幅




ハイ 430幅/460幅

安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

EXGEL®

EXGEL®

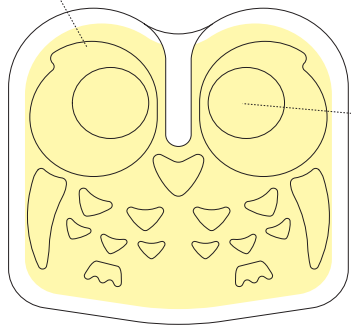

- ・アウルREHAは利用者の体格や症状に合わせて、複数のタイプから選んでご利用いただけます。
- ・ふくろうのデザインは臀部を効果的に減圧する機能性から導かれたデザインです。
- ・アウルアイが最も圧力のかかる坐骨部を包みこむようにサポートして効果的に減圧します。
- ・本体表面はしなやかでストレッチ性に優れた合成皮革を使用しており、表面が汚れてもメンテナンスが簡単です。


■ 専用カバー

- ・表面がさらっとした風合いのストレッチ性カバーでムレを防ぎます。
- ・防水機能のあるフィルムをラミネートしています。
- ・専用カバーは着脱可能でお洗濯いただけます。
- ・底面は滑り止め加工されており、使用中の不快なずれを防止します。

正しい使い方

■ 設置方法


- ① クッション本体に専用カバーを装着します。その際クッション本体は凹凸面が上側に、専用カバーは滑り止めが下側になるようイラストのように装着してください。

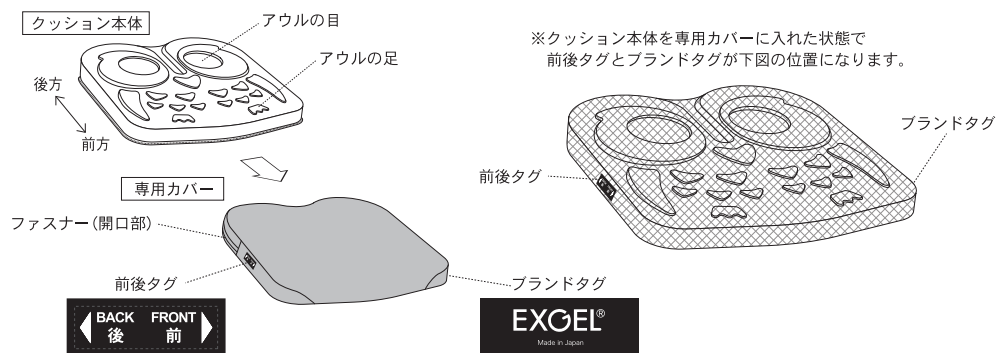

※専用カバー後ろ側のファスナー (開口部) より前後方向を確認して入れてください。

- ② 車椅子の上に右図のように前後タグの表記に従って設置してください。クッション本体のアウルの足が前方、アウルが目が後方になります。

※このクッションには前後方向があります。
専用カバーのファスナーが後ろ側 (背中側) になります。

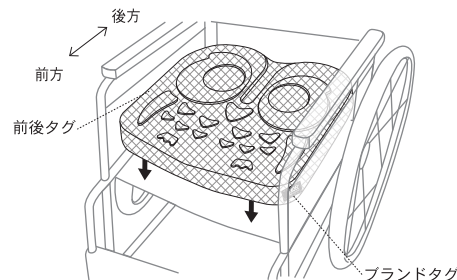

- ③ 最も圧力のかかる坐骨部がアウル目の中央部分にくるように座ってください。

※移乗の際は身体をしっかりと支え、転倒や転落に充分にご注意ください。

※クッションの厚さにより車椅子のフットレストの高さ調整などを行ってください。

△ クッションのご使用は医師や専門家にご相談のうえご使用ください。

△ クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。

△ ご自身で身体を支えられない方は、必ずどなたか立ち会いのもとご使用ください。

■ 専用カバー

- ・取り外した専用カバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします。)
- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンがけ、商業クリーニング、乾燥機の使用はできません。
- ・乾燥する際は日陰で平干ししてください。



■ クッション本体

- ・汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意ください。

■ 消毒

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1%に希釈して使用してください。
原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・有機溶剤 (シンナー、ベンジン等) は使用しないでください。



△ 安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェル特性上、高温時の蒸れや低温時の冷さを感じる場合があります。
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り (お風呂等) で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・本製品を設置する椅子やシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際はご注意ください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、専用カバー裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
- ・クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。