


本製品の特徴

座り心地を極めたカタチ。

座る身体には想像以上にストレスがかかるもの。

その衝撃や圧力をエクスジェルがやさしく支え、通気性を保ちながら、いつまでも快適に。

座り心地をとことん追求していくと、自然とやさしいふくろうのカタチになりました。

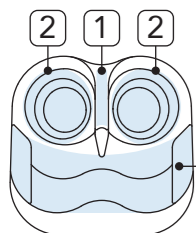

1 突起部を保護する アウル・スリット

ふくろうの鼻の部分にあるスリット。この溝の部分が、尾骨から仙骨にかけての突起部を保護します。

2 痛みを軽減する アウル・アイ

ふくろうの目に見える部分は、ちょうどお尻が当たる部分です。坐骨に集中した圧力を軽減します。

3 姿勢を安定させる アウル・フェザー

ふくろうの羽にみたてたデザイン。もも裏をやさしく受け止め、規則的な起伏が通気性を確保します。



品名	エクスジェル® ザ・アウル 3D ハイエスト		
カラー（品番）	本体	グレー	
	カバー	ブラック(OWT12-BK)、キャメル(OWT12-CA)、ローズ(OWT12-RO) ターコイズ(OWT12-TQ)、スカイ(OWT12-SK)、イエロー(OWT12-YL)	
材質	本体	表材	クロロプレンゴム・ナイロン 88.5%・ポリウレタン 11.5%
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
	カバー	表材	人工皮革(ウルトラスエード®)・ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
サイズ・重量	W410×D400×H67(mm)・約1.7kg 製品サイズ、重量は個体差があります。		

製品 / 付属品内容

- ・クッション本体 1 個
- ・専用カバー 1 枚
- ・取扱説明書(本書類)1 枚
- ・保証書 1 枚

kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3

TEL : 0854-54-2288

《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-11 加瀬ビル 88 8F

TEL : 045-482-3551

《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7

TEL : 0774-98-2633



OWT12-INS-JP01

エクスジェル®/EXGEL®、アウル®/OWL®は株式会社加地の登録商標です。ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

EXGEL
SEATING LAB

THE OWL 3D Highest



エクスジェル® ザ・アウル 3D ハイエスト

OWT12

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。


この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

ご使用方法

1. 専用カバー装着

クッション本体に専用カバーを装着します。その際本体は凹凸面が上側に、カバーは滑り止めが下側になるように装着してください。


クッション本体を専用カバーに入れた状態でブランドタグが右図の位置になります。カバー後ろ側の開口部より入れてください。

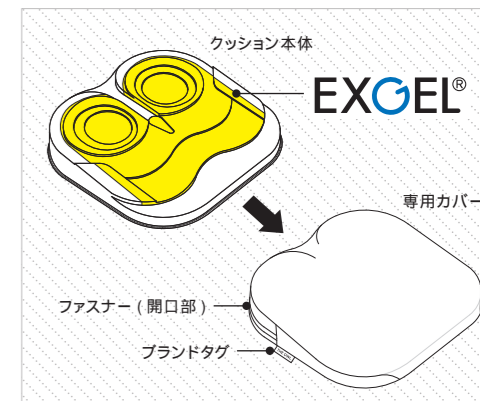

2. 設置方向


椅子などの上に右図のようにクッションを置いてください。

カバーのファスナーが後側になります。

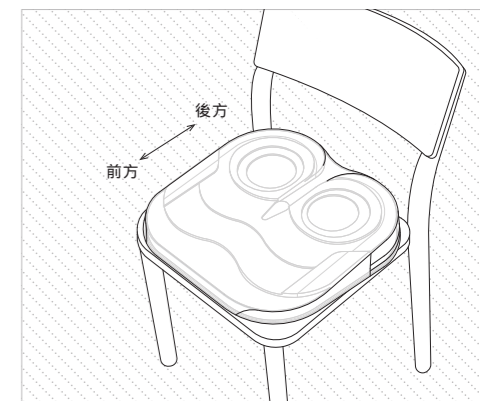

3. 座り方

右図のように座ると最も圧力のかかる坐骨部がふくろうの目の位置になり、圧力の集中を緩和します。

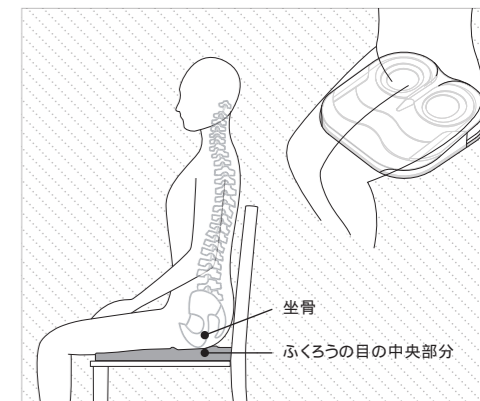

Made in Japan

