

|          |     |                             |                    |
|----------|-----|-----------------------------|--------------------|
| 品 名      |     | エクスジェル® オザブ                 | エクスジェル® オザブ ハイエスト  |
| カラー(品 番) |     | ピンク(AZB01-PK)、ブルー(AZB01-BL) | グレー(AZB02-GR)      |
| 材 質      | 表 材 | ウレタン合成皮革                    |                    |
|          | 中 材 | エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム      |                    |
|          | 裏 材 | 滑り止め加工付きナイロン                |                    |
| サイズ      |     | W460×D460×H45(mm)           | W460×D460×H100(mm) |
| 重 量      |     | 約 1.7kg                     | 約 2.5kg            |

製品 / 付属品内容

※製品サイズ、重量は個体差があります。

- ・クッション本体 1 個
- ・取扱説明書(本書類)1 枚
- ・保証書 1 枚

kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3 TEL：0854-54-2288  
《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-11 加瀬ビル 8F TEL：045-482-3551  
《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7 TEL：0774-98-2633

メールで  
お問い合わせ



○エクスジェル®/ EXGEL®は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

AZB01/02-INS-JP01

EXGEL  
SEATING LAB

AU ZABU



AZB01



AZB02

エクスジェル® オザブ(AZB01)  
エクスジェル® オザブ ハイエスト(AZB02)

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、  
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

※写真は現物とは異なる場合があります。


Made in Japan

## ご使用方法

1. 平らな床の上で使用してください。



2. お尻の圧力のかかる部分をエクスジェルがしっかり受け止め、圧力の集中を緩和します。

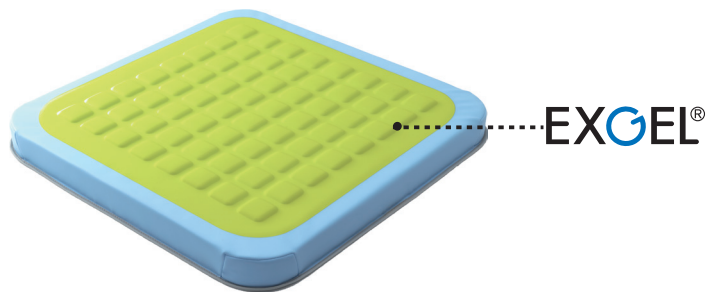

※床暖房やホットカーベットの、上、こたつで使用できますが、火気や高温になる暖房器具には近づけないでください。

## お手入れ方法

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。  
次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。  
但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1%に希釈して使用してください。  
原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。

## 使用上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



### 警告

- ・クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。



### 注意

- ・本製品は、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。  
洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。  
汚れた場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染みこませ拭き取ってください。
- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェル特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。  
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。  
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・本製品を設置する床や椅子の材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際はご注意ください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

## 保管上のご注意

- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。