

## 取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、  
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

## 仕様

品名	エクスジェル®坊主まくら		
カラー	ベージュ		
サイズ	W300×D140×H70 mm		
重量	0.9 kg		
材質	本体	表材	ウレタン合成皮革
		中材	合成ゴム(エクスジェル®)、EPDM、 ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン


## お手入れ方法

- クッション本体
  - ・汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
  - ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
  - ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。
  - ・有機溶剤（シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。



## 正しい使い方

ここに EXGEL®

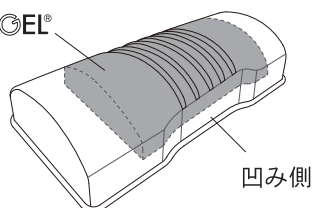

- ・頸椎の下に敷いてご使用ください。
- ・起伏側が上になるように設置してご使用してください。
- ・凹み側が肩側になるように設置してご使用ください。
- ・蒸れが気になる場合は、タオルなどを本製品の上に敷いてご使用ください。
- ・別売りで洗濯可能な専用カバーがございます。

⚠ 本製品をご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、  
医師や専門家にご相談ください。

## 安全上の注意事項

- ・疲労痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保障するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・ご使用になる場所や使用方法等により、カバー底面の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

## エクスジェルの特徴

## エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からモータースポーツの最前線まで。エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。

わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高機能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。

## 人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

## 身体を柔軟にサポート

荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせ柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

## 優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない（スポンジ状ではない）ため座ったときの底つき感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

## 衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ10倍以上の高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。

エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

## 身体の動きへの追従性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。

**EXGEL®**  
kaji corporation  
<http://www.exgel.jp/>  
エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

■ 製造国 日本  
■ 製造元 株式会社 加 地  
横浜営業所  
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33  
サウス・コア内  
TEL : 045-482-3551 FAX : 045-482-3552

本社/工場  
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3  
TEL : 0854-54-2288 FAX : 0854-54-2282  
けいはんなR&Dセンター、京都営業所  
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7  
TEL : 0774-98-2633 FAX : 0774-95-3853