

品名	カンフィ		
	スモール	ベース	シリンダー
品番	COM01-GR1	COM02-GR1	COM03-GR1
サイズ(mm)	L350×W250	L550×W400	L750×Φ180
重量(Kg)	約0.3	約0.8	約0.7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さや角度の調整</li> <li>手や上腕など小さい面積のサポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>肩から頭部のサポート</li> <li>側臥位の背中へのサポート</li> <li>仰臥位の大腿部のサポート</li> <li>腕や脚のサポート</li> <li>尖足の予防</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>側臥位の背中や下肢のサポート</li> <li>仰臥位の腕や脚のサポート</li> <li>ひざ下に入れ下肢の除圧や前ずれ防止</li> </ul>

品名	カンフィ	
	ブーメラン	ウェーブ
品番	COM04-GR1	COM05-GR1
サイズ(mm)	L700×W400	L750×W650
重量(Kg)	約0.7	約1.3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>円背の方の仰臥位での姿勢をサポート</li> <li>肩から頭部のサポート</li> <li>肩から上腕のサポート</li> <li>座位での上腕のサポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下肢のサポート</li> <li>※クッションの凹凸に下肢を沿わせることで姿勢が安定</li> <li>丸めて側臥位の背中へのサポート</li> </ul>

※製品サイズ、重量は個体差があります。

カラー			本体：アイボリー / カバー：グレー
材質	本体	表材	ポリエステル 80%、綿 20%
		詰物	ポリエステル 100%
	カバー	表材	ウレタン合成皮革

製品 / 付属品内容：クッション本体 1 個・専用カバー 1 枚・取扱説明書 (本書類) 1 枚・保証書 1 枚

kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3

《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-11 加瀬ビル 88 8F

《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7

TEL：0854-54-2288

TEL：045-482-3551

TEL：0774-98-2633

メールでのお問い合わせ



○カンフィ®/ COMFY®、シーティングラボ®/ SEATING LAB® は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

COM01/COM02/COM03/COM04/COM05-INS-JP02

SEATING LAB

COMFY

スモール



ベース



シリンダー



ブーメラン



ウェーブ



## カンフィ(スモール / ベース / シリンダー / ブーメラン / ウェーブ) 取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

Made in Japan

## ご使用方法


本製品は、姿勢保持、圧力分散、緊張緩和のためのクッションです。  
様々な形、サイズのクッションを組み合わせることでより効果的なポジショニングを実現します。  
サポートする部位、用途に合わせて選定してください。  
△クッションは医師や専門家にご相談のうえご使用ください。  
△クッションをご使用の際は、呼吸を妨げないよう注意してください。

### ご使用方法

1. 必要に応じてクッションの中材を寄せたりして厚みや形状を整えてください。  
中材の極小の粒綿が身体にフィットし、形状を保ちます。
2. クッションに体重が乗るように設置してください。
3. 身体の上から軽く圧をかけ、クッションになじませてください。
4. クッションと体の間に手を差し込んで圧抜きをしてください。

#### 仰臥位の使用例①

ブーメラン：円背・屈曲拘縮の方の仰臥位の安定と背部の圧力分散。  
スモール：高さや角度の調節。

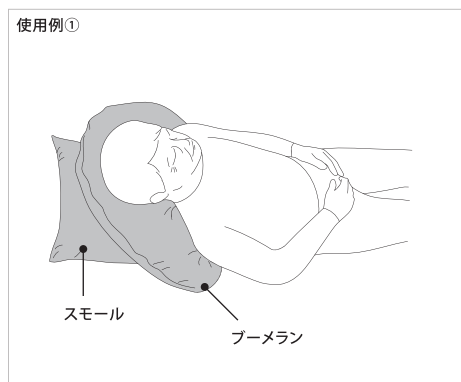

#### 側臥位の使用例②

ベース：肩から頭部をサポート。  
ウェーブ：側臥位の背部をサポート。  
※クッションを丸めて使用  
シリンダー：側臥位での下肢のサポート。



## 保管上のご注意

- ・製品の破損や火災の恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・高温高湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所で保管して下さい。
- ・クッションを圧縮した状態で保管しないでください。
- ・クッションの上に重量物を置かないでください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。

## 使用上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



### 警告

- ・クッションは医師や専門家にご相談のうえご使用ください。
- ・クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・本製品を顔にかぶせたり、口に入れたり、飲み込んだりしないでください。



### 注意

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・クッションをご使用の際は、呼吸を妨げないよう注意してください。特にうつ伏せや横向きで使用する際は注意してください。
- ・製品の破損や火災の恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・強く引っ張るなどの過度な力を加えないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。詰物がこぼれ出た場合は、直ちに使用を中止し、詰物が飛散し口や鼻に入らないように注意してください。
- ・色移りすることがありますのでご注意ください。

## お手入れ方法

### ■ 専用カバー

- ・洗濯表示を必ずお守りください。
- ・取り外した専用カバーは、液温は95℃を限度として洗濯できます。
- ・漂白剤、塩素系製品、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンがけは出来ません。
- ・ドライクリーニングは、弱い処理を行ってください。ウェットクリーニングは通常の処理が可能です。
- ・タンブル乾燥をご使用の際は、カバーの劣化の原因となる場合がありますので低温乾燥にしてください。

### ■ クッション本体

- ・洗濯表示を必ずお守りください。
- ・クッション本体は、液温は40℃を限度として洗濯できます。
- ・漂白剤、塩素系製品は使用しないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンがけ、ドライクリーニングはできません。
- ・ウェットクリーニングは通常の処理が可能です。
- ・タンブル乾燥をご使用の際は、高温乾燥が可能です。

### ■ 消毒(カバー)

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。  
次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。  
但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1%に希釈して使用してください。  
原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・有機溶剤(シンナー、ベンジン等)、腐食性の洗浄剤は使用しないでください。
- ・オゾン、ホルムアルデヒドでの殺菌は出来ません。