

人工皮革（ウルトラスエード®）のご注意

人工皮革（ウルトラスエード®）のお手入れに関する注意事項

日頃のお手入れに家庭用洗剤を使った後、拭き取りが充分でないと残留した洗剤がスエード調人工皮革を構成するポリウレタンの強度を低下させ、素材の表面品位を損なうなどの問題が生じる恐れがあります。洗剤のご使用は極力お避けください。

尚、高濃度の洗剤（原液）の使用は最も問題を生じ易く、もし洗剤を使用する場合は、水などで10 倍以上に希釈した洗剤を使うことは勿論、最後にきれいな濡れタオル等で洗剤成分を十分に拭き取るなどの点にご注意ください。

ウルトラスエード®のお手入れ方法はこちら <https://www.ultrasuede.jp/support/index.html>

- 人工皮革（ウルトラスエード®）のお取扱いのご注意
- ・見る方向、角度によって色相が異なって見えますが、これは本素材の毛羽に方向性があるためであり、色違いによるものではありません。
 - ・ウルトラスエード®または他の素材の白や淡色と、ウルトラスエード®の中濃色の組合せは色移行の恐れがありますので、あらかじめ充分にご注意ください。
 - ・スエード調の人工皮革は、毛羽が移りやすくなっております。衣類などにウルトラスエード®の毛羽が付着したときは、ブラシなどで取り除いてください。
 - ・ウルトラスエード®は超極細繊維（毛髪の約 1/20 の細さ）の繊維で構成され、柔らかく作られております。繰り返してすりますと、毛羽立ち・破れの原因になります。
 - ・独特のタッチを作り出すために、超極細繊維を使用しております。したがって、高熱によりその繊細なタッチが損なわれたり、コゲ跡が残ることもあります。特にタバコの火やストーブ等にご注意ください。



品 名		カドル			
		スクエア 42	スクエア 46	スクエア 51	ラウンド 38
品 番		CDL42	CDL46	CDL51	CDL38
材 質	本 体	表 材			
		中 材			
	カ バ ー		人工皮革（ウルトラスエード®）		
サイズ（mm）		W420×D390×H26	W460×D390×H26	W510×D390×H26	W380×D380×H26
重 量（kg）		約 0.9kg	約 1.0kg	約 1.1kg	約 0.7kg

※製品サイズ，重量は個体差があります。

- 製品 / 付属品内容
- ・クッション本体 1 個
 - ・専用カバー 1 枚
 - ・取扱説明書（本書類）1 枚
 - ・保証書 1 枚

kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本 社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3 TEL：0854-54-2288
《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-11 加瀬ビル 88 8F TEL：045-482-3551
《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7 TEL：0774-98-2633



○エクスジェル®/ EXGEL®、カドル®/Cuddle®は株式会社加地の登録商標です。○ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

CDL38/42/46/51-INS-JP01

EXGEL
SEATING LAB

Cuddle
Supple GEL Cushion



Square51



Round38

エクスジェル® カドル

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

Made in Japan

ご使用方法

1. 専用カバー装着



クッション本体を折りたたむようにして専用カバー下側のファスナーより入れてください。

※ファスナーを強い力で無理に開けると、ファスナーが破損する恐れがありますのでご注意ください。

装着後はカバーの隅まで、まんべんなくクッション本体が入るように形を整えてください。

クッション本体・専用カバーに表裏はございません。

※クッション本体を専用カバーに入れた状態でファスナーが背中側になります。

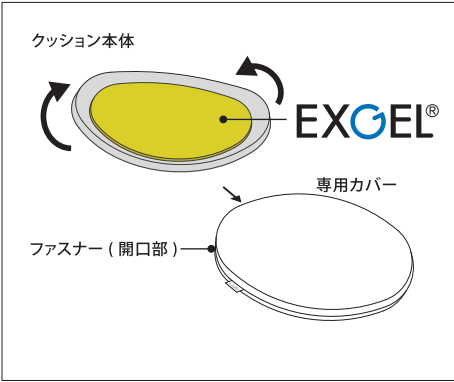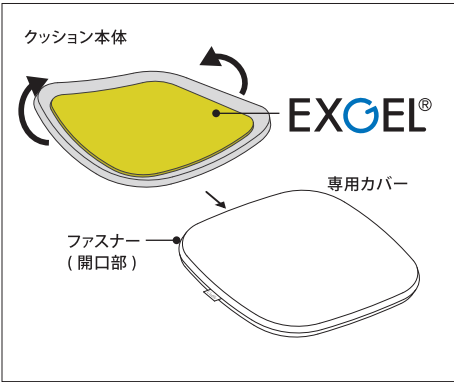

2. 設置方向


椅子などの上にクッションを置いてください。

※カバーのファスナーが背中側になります。

※カバーはリバーシブルです。上にするカラーによってはブランドタグの位置が異なります。

3. 座り方

右図のように座ると最も圧力のかかる部分をエクスジェルがしっかり受け止め、圧力の集中を緩和します。

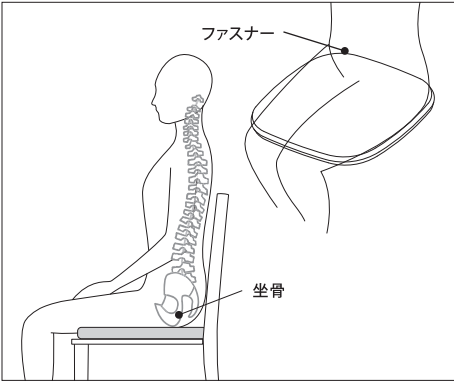

使用上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

- クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。



注意

- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- 水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- 製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 本製品を設置する椅子やシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際にはご注意ください。

保管上のご注意

- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。

お手入れ方法

■クッション本体

- 汚れた場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染みこませ拭き取ってください。
- 水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- 洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。

■カバー

日常的なお手入れ

- 汚れなどが発生したら速やかに汚れ落としをお願いいたします。
- ホコリや毛羽などの付着汚れはエチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。
- 全体の汚れが気になる場合は 40℃程度のぬるま湯を染みこませ固く絞った布やワイピングクロスで全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

※ご注意：ぬるま湯は固く絞り、毛羽が強く乱れないように拭き取ることが大切です。

また、布やワイピングクロスの汚れは充分取り除いてからご使用ください。

洗濯

- 取り外したカバーは、液温 30℃を限度とし、非常に弱い洗濯ができます。洗濯ネットと家庭用中性洗剤の使用をお勧めします。
- 色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- 他の素材と一緒に洗濯すると、素材や色によっては汚染の可能性があります。
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 洗濯の際は長時間水に浸けず、洗濯後はすぐに脱水して干してください。
- 脱水は短時間で行ってください。
- 乾燥機は使用しないでください。
- 乾燥する際は、日陰で干してください。
- アイロンは当て布を使用し低温で当ててください。スチームアイロンは使用できません。
- 商業クリーニングはできません。