

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からモータースポーツの最前線まで。エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高機能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせて柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底つき感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ10倍以上の高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

身体の動きへの追随性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追随するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。



kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場 TEL : 0854-54-2288
〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3 FAX : 0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所 TEL : 0774-98-2633
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7 FAX : 0774-95-3853

横浜営業所 TEL : 045-482-3551
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33サウス・コア内 FAX : 045-482-3552

○エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。○掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。

TBZ50-INS-JP01

<http://www.exgel.jp/>

エクスジェル®携帯用体圧分散円座クッション

たび・さぶ円座

取扱説明書




安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

クッションの特長

EXGEL®

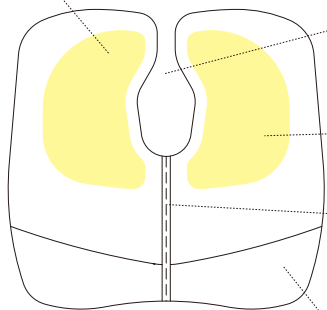


- ・新幹線や航空機のシートに対応したサイズのクッションです。
- ・深さ約26mm、最大幅約70mm、長さ約100mmのしずく型のくり抜き部分が痛みの発生しやすい部位や尾骨・仙骨周辺とクッションや床などとの接触を回避します。
- ・最も圧力のかかる坐骨部付近に効果的にエクスジェルを配置し、体圧を分散します。
- ・クッションはステッチに沿って折りたたみ可能で、収納時はゴムベルトをかけていただくとお鞆などの中で開かずに入ることができます。
- ・底面には滑り止め効果がある合成皮革を使用し、ずれを防止します。
- ・前方部の厚みを薄くすることで、着座時の大腿部の圧迫感を緩和します。
- ・座面側には高級人工皮革を使用し、滑らかな肌触りに仕上げました。また、表面にはパンチング加工を施し、通気性にも配慮しました。

正しい使い方

■ 設置方法


- ・いすなどの上に図のようにクッション本体のくり抜き部分が後方になるように、人工皮革（パンチング加工）側が上になるように置いてください。
- ・お尻から尾骨にかけての痛みが発生しやすい部分が、クッションのくり抜き部分の上になるよう座ってください
※炎症や化膿などによる痛みを緩和するものではありません。

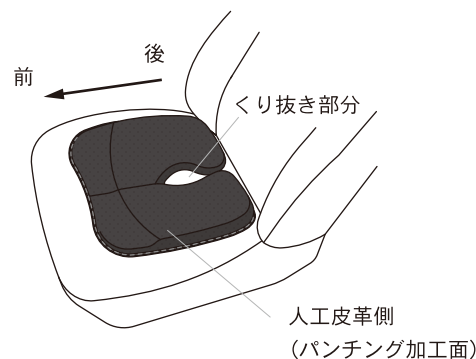

- ⚠ クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。

■ 収納方法

- ・収納の際は図のようにクッション中央の溝にあるステッチに沿って人工皮革側を表にして左右に折りたたむと開かずにきれいに収納できます。
- ※ステッチ以外の場所で折り曲げないでください。シワや変形などの原因になる恐れがあります。

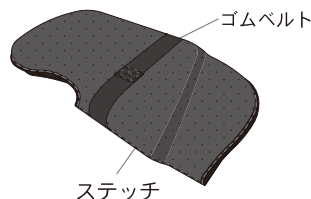

お手入れ方法

- ・汚れた場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯を布に含ませて、汚れた部分を軽くたたくようにして拭き取り、その後湿らせた布で洗剤を十分に拭き取ってください。
- ・油性の汚れの場合は、まず上記と同様の方法をお試しください。それでも汚れが残るようであれば、アルコールを布に含ませて、汚れた部分をたたくようにして拭き取ってください。
- ・飲み物など液体をこぼした場合は、すぐに乾いた布やティッシュペーパーで吸い取るように押さえると簡単に拭きとれます。
- ・座面側の人工皮革のお手入れは、軽く衣料用ブラシをかけてください。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

⚠ 安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保障するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。

製品スペック

製品/付属品内容：クッション本体 1枚 ・ ゴムベルト 1個 ・ 取扱説明書(本書類) 1枚 ・ 保証書 1枚

	品名	エクスジェル® たび・ざぶ 円座		
	カラー	本体：ブラック・ベージュ		
	材質	本体	表材	人工皮革
			中材	エクスジェル（合成ゴム）、ウレタンフォーム
		裏材	ウレタン合成皮革	
		ゴムベルト	ポリエステル88%・ポリウレタン12%	
	品番	ブラック TBZ50-BK	サイズ	広げた場合：W400×D380×H27 (mm) 2つ折りの場合：W200×D380×H54 (mm)
			重量	約0.4kg (ゴムベルト含む)
	品番	ベージュ TBZ50-BE	サイズ	広げた状態：W400×D380×H27 (mm) 2つ折りの場合：W200×D380×H54 (mm)
		重量	約0.4kg (ゴムベルト含む)	