

品名/品番	エクスジェル®浴室クッション 着用タイプ / BRC02-BR		
カラー	GELシート/ブラウン、連結シート/ブラック		
材質	GELシート	表材	ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
	連結シート	ナイロン86%、ポリウレタン14%	
	ベルト	ポリプロピレン100%	
	樹脂パーツ	ポリアセタール	
サイズ/重量	W315×D300×H240(mm) / 約1.1kg		

※製品サイズ、重量は個体差があります。

#### 製品 / 付属品内容

- ・クッション一式 (GELシート2枚、連結シート1枚)
- ・取扱説明書(本書類)1枚
- ・保証書1枚

※EXGEL®、エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

※本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

# EXGEL®

## 取扱説明書

### エクスジェル®浴室クッション 着用タイプ BRC02



**kaji corporation**

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》  
〒699-1511  
島根県仁多郡奥出雲町三成  
1295-3  
TEL : 0854-54-2288

《横浜営業所》  
〒224-0032  
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央  
8-33 サウス・コアビル内  
TEL : 045-482-3551

《けいはんな R&D センター》  
《京都営業所》  
〒619-0237  
京都府相楽郡精華町光台 3-2-7  
TEL : 0774-98-2633

## 安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

※上記画像は BRC02-BR です。


※写真は現物とは異なる場合があります。

## 正しい使い方

### ■ 使用方法


①GELシートを連結シートにホックで固定します。

GELシートは表裏があります。EXGELのロゴがある面が表(身体)側になります。

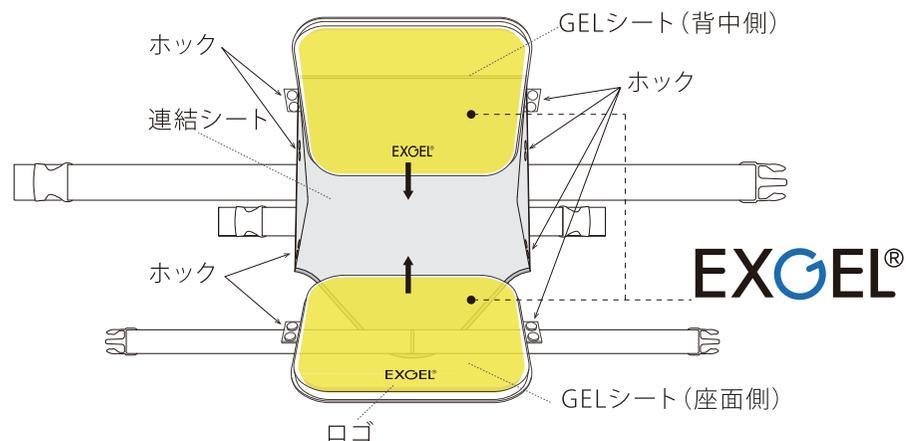

②ロゴの向きとベルトの位置を確認し、座面側 GEL シートに尾骨と坐骨が保護されるように座り、ベルトで身体に固定してください。

胴体側ベルトは腹部で、脚側ベルトは左右の大腿部でバックルを留めてください。  
ベルトの長さを調整し、ゆるみなく身体に固定されていることを確認してください。

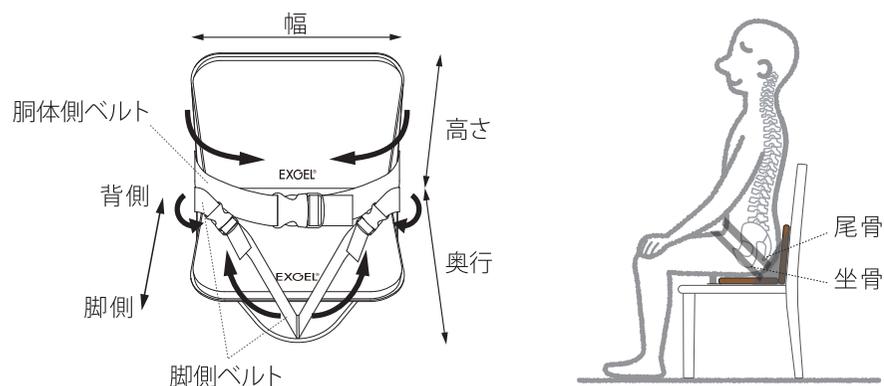

移乗の際は身体をしっかり支え、転倒や転落に充分にご注意ください。

⚠️ クッションは医師や専門家にご相談のうえで使用ください。

ご自身で身体を支えられない方は、必ずどなたか立ち会いのもとで使用ください。

### ■ 消毒 (GELシート)

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。  
原液のまま使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・煮沸消毒をしたり、熱湯をかけたりしないでください。
- ・次亜塩素酸ナトリウムは使用しないでください。  
※連結シートは消毒できません。

## 使用上の注意事項(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### ⚠️ 警告

- ・クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・ご使用後は、石けんやシャンプーなどを洗い流してください。ご使用の際に滑り易くなり、転落する恐れがあります。

### ⚠️ 注意

- ・汚れがひどい場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取った後、洗剤を水やお湯で洗い流してください。洗濯機での洗濯はできません。必ず手洗いしてください。
- ・海やプールでのご使用後は、真水で塩分や塩素剤などを洗い流してください。
- ・ご使用後は、直射日光を避け、湿気の少ない風通しのよい場所で平干ししてください。  
GELシートは連結シートから外して乾かすことをお勧めします。  
濡れたままの状態ではカビが生じる場合があります。
- ・タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。
- ・漂白剤やカビ取り用洗剤などは使用しないでください。
- ・乾燥機やアイロン等は使用できませんのでご注意願います。  
商業クリーニングはできません。
- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。  
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。  
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法等により、連結シートが摩耗や破損する場合がありますのでご注意ください。
- ・バックルは各部品(プラグとソケット)を真っ直ぐに挿入し、「カチッ」という組み合わせ音を確認できるまで挿入してください。挿入後、組み合わせ固定がしっかりされたかを確認した上でご使用ください。中途半端な組み合わせ状態で使用すると変形や脱落の原因になります。

### 保管方法

- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・製品を保管する際は、立て掛けずに平置きしてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。