

品名	エクスジェル® アクティブ車椅子用アームレストパッド	
品番	OWA20-BK	
カラー(色番)	ブラック	
仕様	表材	ウレタン合成皮革
	取付ベルト	ナイロン 86%・ポリウレタン 14%
	中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
	裏材	ウレタン合成皮革
サイズ	W224×D84×H14 (mm) ※GEL パッド部分	
重量	約 70g	
適応サイズ	アームレスト直径 33~39 (mm)	

※製品サイズ、重量は個体差があります。

製品 / 付属品内容

- ・アームレストパッド本体
- ・取扱説明書(本書類)1枚
- ・保証書1枚

※EXGEL®、エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

※アウル®は株式会社加地の登録商標です。

※本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

EXGEL®

取扱説明書

エクスジェル® アクティブ車椅子用アームレストパッド OWA20-BK



kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》
〒699-1511
島根県仁多郡奥出雲町三成
1295-3
TEL：0854-54-2288

《横浜営業所》
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央
8-33 サウス・コアビル内
TEL：045-482-3551

《けいはんな R&D センター》
《京都営業所》
〒619-0237
京都府相楽郡精華町光台 3-2-7
TEL：0774-98-2633

OWA20-HNS-JP01

Made in Japan


安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

※写真は現物とは異なる場合があります。

正しい使い方


本製品はシリンダータイプのアームレスト用パッドです。

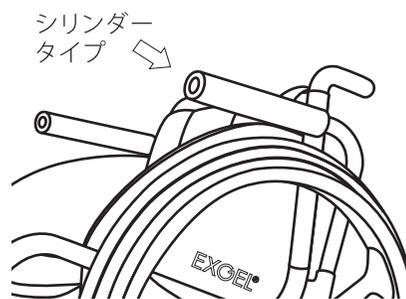

■ 設置方法

脱着可能なアームレストは、取り外してから装着してください。

- ①アームレストの上にアームレストパッドをセットします。
アームレストパッドに前後はありませんが、タグは片側に付いています。
車椅子を操作する時に面ファスナーが邪魔にならない向きに装着してください。
- ②三分割した面ファスナー（フック）のセンターを軽く引っ張り、面ファスナー（ループ）に仮止めしてください。
その際、アームレストパッドのジェル面が上になるよう設置してください。
- ③面ファスナー（フック）の両端を面ファスナー（ループ）にしっかり固定してください。
- ④仮止めした面ファスナー（フック）センターをしっかりと固定してください。
その際アームレストパッドはエクスジェル面が上側になるように装着してください。

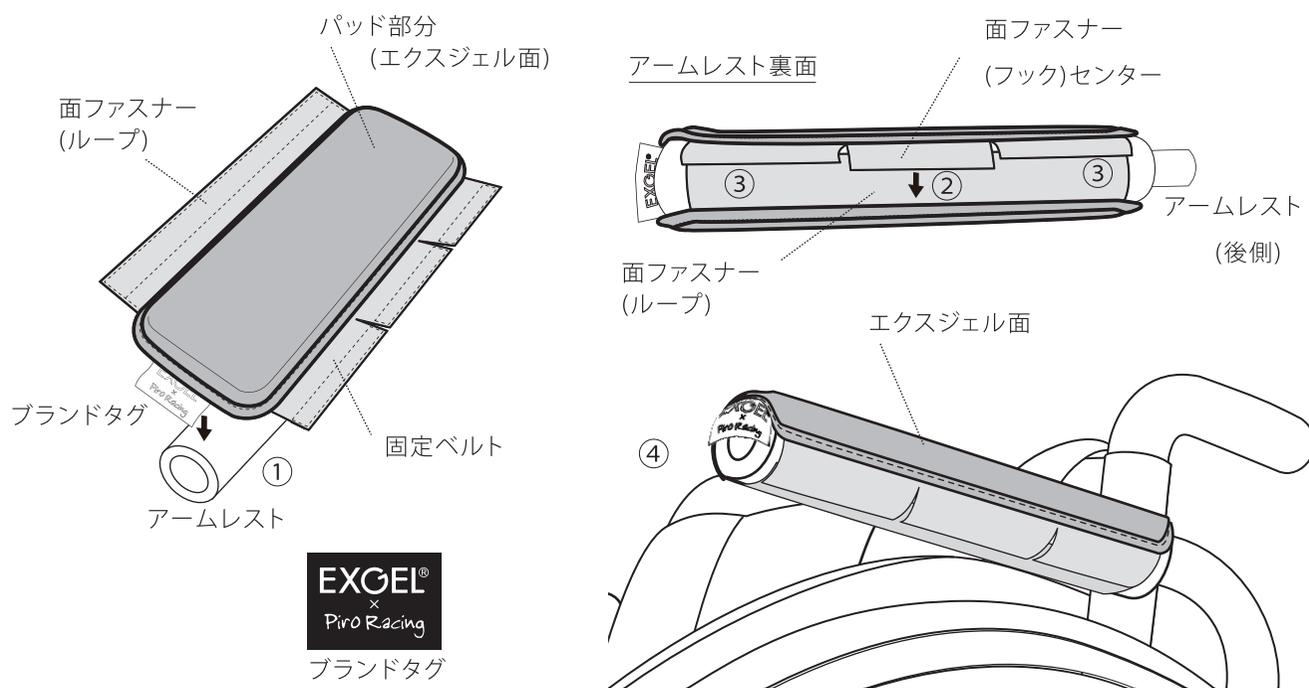

※アウルアクティブ（車椅子用シートクッション／別売）と一緒にご使用いただくと効果的です。

■ 消毒（ウレタン合成皮革）

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1%に希釈して使用してください。
原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
※面ファスナーと帯ゴムは消毒できません。

使用上の注意事項（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

- ・アームレストパッドをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

⚠ 注意

- ・アームレストパッドは、水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。
汚れた場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませ拭き取ってください。
- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。
その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・本製品を設置する車椅子アームレストの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際はご注意ください。

保管方法

- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・製品を保管する際は、立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。