

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からモータースポーツの最前線まで。
エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。
わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高機能素材E
X G E L (エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑
戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせて柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底つき感が少なく、
優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ10倍以上の高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。
エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

身体の動きへの追随性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追随するため、低反発ウレタンフォーム等とは
異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり
感が少ないのも大きな特長です。



■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3
TEL: 0854-54-2288
FAX: 0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7
TEL: 0774-98-2633
FAX: 0774-95-3853

横浜営業所
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19-11 加瀬ビル8F
TEL: 045-482-3551
FAX: 045-482-3552

○エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。○掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告無く変更
する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります
。○サイズなどは多少の個体差があります。

BRC01-INS-JP02

<http://www.exgel.jp/>

エクスジェル® 浴室クッション

取扱説明書



安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。



クッションの特長



■クッション本体

- ・クッション全面にエクスジェル®を配置し、臀部の圧力を分散します。
- ・クッション本体は付属のベルトで簡単にシャワー椅子に固定可能です。
- ・クッション本体は、防水仕様です。

■ベルト

- ・ベルトはD形状の金具（Dカン）2個付きで長さ調節が可能です。
- 左図のような様々なサイズのシャワーいすにご使用いただけます。
- ・ベルトはホックで簡単に取り外し可能です。

正しい使い方

■ 使用上の注意

▲ ご使用の前に必ずご確認ください。


- ・必ず平坦で安定した場所に設置して下さい。不安定な場所で使用すると転倒などの恐れがあります。
- ・ご使用前に本製品やシャワーいすなどについた石けんやシャンプーなどを洗い流してください。滑り易くなり、転落や転倒などの恐れがあります。
- ・ベルトにゆるみがなくクッションが固定されていることを確認してください。ベルトがゆるんでいる場合、使用中にクッションが動き転落や転倒などの恐れがあります。
- ・本製品をベルトで固定せず、床などに置いて使用する際は、クッションが滑らないことを確認してからご使用ください。
- ・本製品を浴槽の中など水の中に沈めて使用するとクッションが浮き上がり不安定になる為、転倒などの恐れがあります。特殊入浴装置などのご利用の際は、ベルトでしっかりと固定し、クッションが浮いたり動いたりしないことを確認したうえでご利用ください。
- ・クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家に相談ください。
- ・本製品の上で立ち上がらないでください。転倒の恐れがあります。

■ シャワー椅子への設置方法


- ① EXGELのロゴ側を上にしてシャワーいすに置き、ベルトをシャワーいすの座面の下側に通してください。
- ② ベルトをDカン2個に通します。




※このクッションには前後方向はありません。

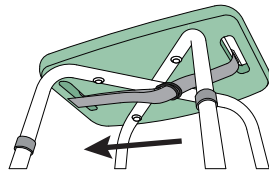

- ③ ベルトを返して2個のDカンの間に通します。

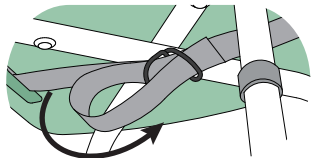

- ④ ベルトを引っ張りクッションを固定して下さい。

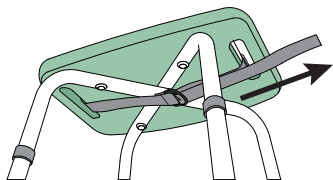

※シャワーいすに取っ手がない場合の取り付け例



▲ 前後方向にズレないようにしっかりと固定してください。

お手入れ方法

■ クッション、ベルト

- ・ご使用後は、石けんやシャンプーなどを洗い流してください。ご使用の際に滑り易くなり、転落や転倒の恐れがあります。
- ・汚れのひどい場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取った後、洗剤を水やお湯で洗い流してください。
- ・ご使用後は、直射日光を避け、湿気の少ない風通しのよい場所で吊るさず水平にして乾かしてください。濡れたままの状態ではカビが生じる場合があります。
- ・タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。
- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意ください。



■ 消 毒

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。原液のまま使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・有機溶剤（シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。
- ・煮沸消毒をしたり、熱湯をかけたりしないでください。



▲ 安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・クッションは座面としてのみご使用ください。背当て等の様に立てかけてご使用にならないでください。必ず平らにしてご使用ください。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・本製品が濡れている場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
- クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自自治体のルールに従い処理してください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。

製品スペック

製品/付属品内容：クッション本体 1個（ベルト付）・取扱説明書（本書類）1枚・保証書 1枚

	品 名	エクスジェル®浴室クッション	
	カラー	ブラウン	
	材 質	表 材	ポリエステル100%（ウレタンフィルムラミネート加工）
		中 材	エクスジェル（合成ゴム）、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム
		ベルト	ポリプロピレン100%
	Dカン	鉄	
	品 番	サイズ (mm)	W350×D240×H15（ベルトを除く）
		重 量 (kg)	約0.5