

品名	エクスジェル® ハグ カンフィ プレミアム		
カラー(品番)	ブラック(HUG01-BK)、キャメル(HUG01-CA)、ローズ(HUG01-RO)		
	スカイ(HUG01-SK)、イエロー(HUG01-YL)		
本体	材質	表材	人工皮革(ウルトラスエード®)
		中材	クロロプレンゴム、エクスジェル®(合成ゴム)
			ウレタンフォーム、ポリプロピレン、フレーム(鋼)
		背裏材	人工皮革(ウルトラスエード®)
座裏材	滑り止め加工付きナイロン		
サイズ・重量	W460×D425×H265(mm)・約2.6kg ※製品サイズ,重量は個体差があります。		

#### 製品 / 付属品内容

- ・クッション本体 1 個
- ・取扱説明書(本書類)1 枚
- ・ウルトラスエード® お手入れ方法 1 枚
- ・保証書 1 枚

**kaji corporation**

<https://exgel.jp/jpn/>

#### 株式会社 加地

《本社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3 TEL: 0854-54-2288  
《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3 丁目 19-11 加瀬ビル 88 8F TEL: 045-482-3551  
《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7 TEL: 0774-98-2633

メールでの  
お問い合わせ



○エクスジェル®/EXGEL®は株式会社加地の登録商標です。○ハグカンフィ®/HUG COMFY®は株式会社加地の登録商標です。○ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

HUG01-INS-JP07

Made in Japan

# EXGEL®

## 取扱説明書

### エクスジェル® ハグ カンフィ プレミアム HUG01



#### 安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

※上記画像は HUG01-YL です。


※写真は現物とは異なる場合があります。

## 正しい使い方

### ■ 設置方法

リビングやオフィス用の背もたれのある椅子の上に、設置図のように本クッションと椅子の背もたれが付くように置いてください。 ※背と座を逆に置かないでください。


EXGEL®

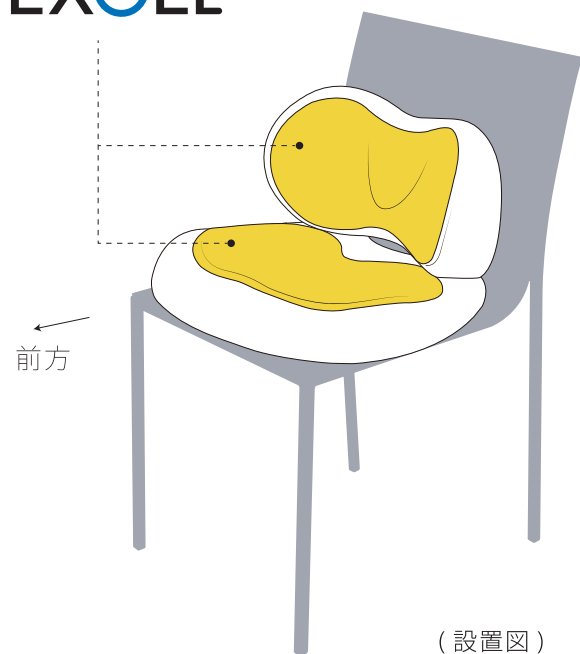

△本クッションが椅子の背もたれに付かない状態で使用しないでください。転倒や製品破損の可能性があります。



### ■ 座り方

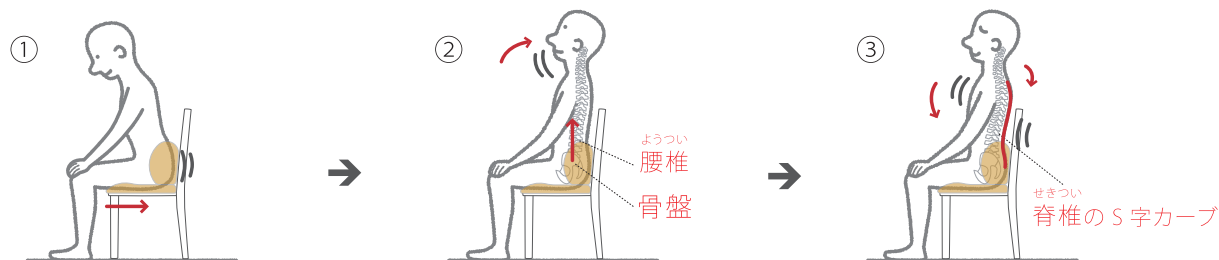

奥まで深く腰掛け腰と本クッションをフィットさせます。

上半身を起し胸を張ると腰まわりを支えられ骨盤が立ちます。

肩の力を抜き上半身をリラックスさせます。

① 本クッションと腰にすき間がないように奥まで深くしっかり座ってください。

② 上半身を起し胸を張ると、骨盤まわりを本クッションが支え骨盤が立ちます。

③ 肩の力を抜いてリラックスすると骨盤の立った自然な姿勢になります。

※緊張した姿勢で座ると反り腰になりますので、ご注意願います。

④ 骨盤を支えながら脊椎のS字カーブは妨げないので、上体は楽に動かせます。

⑤ 長時間座る際は姿勢を変えるなど適度な休憩を取ってください。


## 使用上の注意事項(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### ⚠ 警告

- ・勢い良く腰掛けたり、後方に体重をかけすぎると、後方に転倒する可能性があります。(図A)  
安全のため、ご使用の際は背もたれのある安定した椅子の上への設置を推奨します。座椅子として使用しないでください。
- ・クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

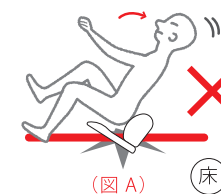

### ⚠ 注意

- ・張り地は取り外さないでください。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄は出来ません。
- ・洗濯機や乾燥機等での洗浄は出来ません。
- ・ファスナーを開けないでください。
- ・持ち運びの際は座面部分を持ってください。(図B)
- ・背もたれと座面の間を持たないでください。(図C)
- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。  
クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法等により、製品裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。



### 保管方法

- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・製品を保管する際は、立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。