

エクスジェルの特徴

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からベビー用品、モータースポーツの最前線まで。エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくため、高機能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせて柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底突き感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ5～10倍ほど高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

*衝撃吸収テスト結果:環境温度17℃ 直径100mm・5kgの鉄球を試料表面から3cmの高さから自由落下。<(財)日本車両検査協会調べ>

身体の動きへの追従性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。



取扱説明書



kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3	TEL:0854-54-2288 FAX:0854-54-2282
けいはんなR&Dセンター / 京都営業所 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7	TEL:0774-98-2633 FAX:0774-95-3853
横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19-11 加瀬ビル88 8F	TEL:045-482-3551 FAX:045-482-3552

メールで
お問い合わせ



○エクスジェル® / EXGEL® は株式会社加地の登録商標です。○アウル® / OWL® は株式会社加地の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

OWK01-INS-JP05

<https://exgel.jp/jpn/>

安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。



クッションの特徴

EXGEL®



- ・アウルスリットが尾骨部から仙骨部にかけての凸部を逃がします。
- ・アウルアイが最も圧力のかかる坐骨部を効果的に分散します。
- ・3次元形状で外転防止、内転防止、臀部ホールド形状、アンカー、フロントスラントの機能を持っています。
- ・底面には滑り止め加工を施し安定した着座姿勢をサポートします。

■カバー

- ・自然な風合いのカバーは着脱可能で、お洗濯いただけます。
- ・裏面は滑り止め加工の生地と面ファスナーで車いすからずり落ち難い仕様になっています。
- ・裏面にウレタンフィルムをラミネートした生地と簡易防水のファスナーを使用し、防水機能を高めました。



製品スペック

製品/付属品内容：アウルキッズ本体 1枚・専用カバー 1枚・取扱説明書(本書類) 1枚

本体

カバー装着



品 名		アウルキッズ			
		標準幅	260幅	280幅	320幅
品 番		OWK01-BK1-3032	OWK01-BK1-2628	OWK01-BK1-2830	OWK01-BK1-3234
サイズ(mm)	W	300	260	280	320
	D	320	280	300	340
	H	70	70	70	70
重 量 (kg)		約0.9	約0.7	約0.8	約1.0
JANコード		4544511013389	4544511013396	4544511013402	4544511013419

カラー			本体：ベージュ / カバー：ブラック
材 質	本 体	表材	ウレタン合成皮革
		中材	エクスジェル® (合成ゴム) 、ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
	カバー	表材	ポリエステル100% ・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン

正しい使い方

■ 設置方法

1. クッション本体に専用カバーを装着します。その際カバーは滑り止めが下側に、本体は凹凸面が上側になるようにセットしてください。(図1)
2. クッションカバーに縫い付けられた図2の前後タグの表記に従って設置してください。

図1

カバー

本体



← 本体挿入方向

図2



お手入れ方法

■ カバー

- ・取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします)
- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンかけ、商業クリーニング、乾燥機の使用はできません。
- ・乾燥する際は日陰で平干ししてください。



■ クッション本体

- ・汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

■ 消 毒

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。次亜塩素酸ナトリウムを用いた場合は、長時間放置せず乾いた布で拭き取ってください。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。但し、次亜塩素酸ナトリウムを用いる場合は、水で0.1%に希釈して使用してください。原液または高濃度で使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。



△ 安全上の注意事項

- ・疲労痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
- ・クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・本製品を設置するいすやシートの材質によっては、稀に摩擦で設置面を傷めたり、色移りする場合があります。設置の際はご注意ください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・ご使用になる場所や使用方法、洗濯の方法等により、カバー底面の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
- ・クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し医師や専門家にご相談ください。